

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: **wyniki.diag.pl**
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



799 399 360



lab@diag.pl

Diagpack



Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Diagnostyka zakażeń
wirusem HPV u mężczyzn



Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego. Test pozwala na szybką diagnostykę zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV, z ang. Human Papillomavirus).

Skład zestawu:

- wymazówka,
- podłoże stabilizujące materiał,
- rękawiczki,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
2. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu, skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
3. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Zestaw jest wyłącznie do jednorazowego użytku.
Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.



Odeślanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewoźowy, który jest **ważny 80 dni od daty wystawienia**.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejając etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

UWAGA: Nie rekomendujemy odnoszenia przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek – piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Uwaga!

Wymaz z dróg moczowo-płciowych męskich może być pobrany samodzielnie.

Wybór miejsca pobrania (prącie lub cewka moczowa) powinien być uzależniony od miejsca występowania objawów zapalnych.

Instrukcja pobrania wymazu:

- + Zachowaj 24 godzinną przerwę w wytryskach nasienia.
- + Powstrzymaj się w oddawaniu moczu co najmniej przez 3 godziny.
- + Przez okres 24 godzin przed pobraniem materiału ogranicz zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych; nie stosować silnych środków myjących, mydeł antybakteryjnych, dezodorantów. Dozwolona jest higiena intymna z użyciem samej wody lub wody i delikatnych środków myjących przeznaczonych do higieny okolic intymnych.
- + Przez okres 48 godzin przed pobraniem materiału nie stosuj żadnych maści zewnętrznych.
- + Zachowaj 7 dni przerwy po leczeniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi.




Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
Naklej kod kreskowy wzdłuż probówki.




Umyj ręce i załóż rękawiczki.



Delikatnie otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym uważając, aby nie dotknąć wymazówki.
a. W przypadku pobierania **wymazu z prącia**: odchyl na-pletek, a następnie wykonując spiralne ruchy kilkakrotnie pocieraj wymazówką rowek założony na całej długości oraz ujście cewki moczowej.
b. W przypadku pobierania **wymazu z cewki moczowej**: wprowadź wymazówkę do cewki moczowej na głębokość 2-3 cm, następnie obracaj kilkakrotnie wymazówkę w jednym kierunku, nie krócej niż 10 sekund.

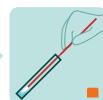

Odkręć zatyczkę probówki transportowej i niezwłocznie umieść wymazówkę z pobranym materiałem w probówce, białą końcówką do dołu.

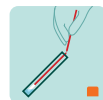

Ostrożnie złam trzon wymazówki wzdłuż naciętej linii, uważaj, aby nie rozlać zawartości probówki.



Zamknij probówkę przy pomocy zatyczki, upewnij się, czy zatyczka jest mocno dokręcona.



Zdejmij i wyrzucić rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.



Probówkę z pobranym materiałem należy niezwłocznie przesać do laboratorium.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.